

## Návod na použití pevného masážního lehátka

### **Polohovací část lehátka**

Přestavení poloh hřebene je možné pouze směrem nahoru. Pokud chcete nastavit polohu nižší než máte, nejprve vysuňte hřeben na doraz, poté spustěte do polohy 0 a pak zvedněte na požadovanou výšku.

### **Technické údaje lehátka a údržba**

1. Maximální pracovní zatížení je 250 kg
2. Rozměr lehátka je 200 x 75 cm, nastavitelná výška lehací plochy je 70 – 95 cm,
3. Při nastavování výšky vždy dobře zašroubujte dřevěné knoflíky a výšku nastavujte vždy bez zatížení!
4. Povrch čalounění omývejte neutrálním mýdlem nebo desinfekčním prostředkem s maximálně 30 % obsahem alkoholu.

V případě masáže s velkým objemem oleje (např. Ajurvédská masáž) je nutné používat nepropustnou netkanou textílii, nebo podobný nepropustný materiál k ochraně povrchu lehátka.

Kvalita masážních lehátek je zaručena dlouhodobou sériovou výrobou a také certifikátem Strojírenského zkušebního ústavu v Jablonci nad Nisou. Certifikát je k nahlédnutí v sídle provozovny.

Vyrobena v ČR