

Návod na použití skládacího masážního lehátka s příslušenstvím

Sestavení skládacího lehátka

1. Odjistěte obě spony.
2. Směrem od sebe lehátko rozevřete. Nepokládejte je na drsný podklad, aby se nepoškodilo.
3. Uchopte lehátko za rám a postavte je. Chodidlem zafixujte nohy, aby neuklouzly.
4. Nastavte výšku lehátka a dobře utáhněte dřevěné knoflíky.

Upozornění: Výšku nastavujte vždy bez zatížení!

5. Rukou podrazte sklápěcí nohy a lehátko postavte.

Polohovací lehátko

Upozornění: Přestavení poloh hřebene je možné pouze směrem nahoru. Pokud chcete nastavit polohu nižší než máte, nejprve vysuňte hřeben na doraz, poté spustíte do polohy 0 a pak zvednete na požadovanou výšku.

Podpěra hlavy

1. Zasuňte podpěru do obou otvorů na čelní straně lehátka.
2. Na podpěru připevněte čalouněný límec.

Loketní podpěra

1. Podpěru zavěste za delší popruh čalouněním nahoru přes obě madla podpěry hlavy.
2. Rozepnutý kratší popruh provlečte pod čalouněným límcem čelní stranou a zapněte sponu.
3. Před upravením podpěry do vodorovné polohy lze změnit nastavení délky popruhu.

Nosnost lehátka a údržba

Maximální pracovní zatížení je 250 kg Lema I /230 kg Lema II/

Maximální zatížení podpěry hlavy je 7 kg /váha hlavy/.

Povrch čalounění omývejte neutrálním mýdlem nebo desinfekčním prostředkem s maximálně 30 % obsahem alkoholu.

V případě masáží s velkým objemem oleje (např. Ajurvédská masáž) je nutné používat nepropustnou netkanou textílii, nebo podobný nepropustný materiál k ochraně povrchu lehátka.

Kvalita lehátek je zaručena dlouhodobou sériovou výrobou a také certifikátem Strojírenského zkušebního ústavu v Jablonci nad Nisou. Certifikát je k nahlédnutí v sídle provozovny.